

### Warnhinweise:

Sollten Sie keinen ordnungsgemäßen Sitz erzielen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. Die Maske sofort auswechseln, wenn der Atemwiderstand ansteigt, und wenn sie feucht oder beschädigt ist. Bart oder andere Haare unter der Maske können den Dichtsitz beeinträchtigen. Die Maske liefert keinen Sauerstoff und schützt nicht vor Gasen und Dämpfen. Nicht verwenden bei Sauerstoffgehalt unter 19,5 Vol. % und nicht verwenden in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder bei sehr starker Hitze. Eine Tragedauer von 8 Stunden sollte nicht überschritten werden. Entsorgen Sie die Maske fachgerecht, unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften. Nach dem Abnehmen Hände gründlich reinigen. Gebrauchte Masken nicht nochmal tragen. Die Maske ist ein Einmalprodukt, da sie weder desinfiziert noch auf andere Art gereinigt werden kann.

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425 für komplexe Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Durchgeführte Baumusterprüfung gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009. Diese Masken eignen sich als Persönliche Schutzausrüstung für den Eigenschutz vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen bzw. mindergiftigen Partikeln, biologischen Arbeitsstoffen und Viren.

### Gebrauchsanweisung Modell GM-02:

Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit und das Verfallsdatum der Maske. Vor der Entnahme der Maske aus der Verpackung sowie vor dem Aufsetzen Hände gründlich reinigen.



1. Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung und falten Sie diese auf, indem Sie leicht seitlich an den Ohrenbändern ziehen. Formen Sie den biegsamen Nasenbügel in der Mitte durch leichtes Biegen vor, um den Nasenbügel später optimal der Nasenform anzupassen.



2. Legen Sie die Maske mit der offenen Seite nach oben in die Hand. Setzen Sie die Maske unter dem Kinn an, mit dem Nasenbügel nach oben.



3. Befestigen Sie die Ohrenbänder hinter den Ohren. Achten Sie darauf, dass die Ohrenbänder nicht verdreht sind.



4. Passen Sie die Maske mit beiden Händen durch leichten Druck an Ihre Gesichtsförmung an, bis die Maske bequem sitzt und abdichtet. Prüfen Sie die Dichtigkeit, indem Sie die Maske mit beiden Händen vorsichtig bedecken und dabei kräftig ausatmen, dabei sollte an den Rändern keine Luft entweichen. Bewegt sich das Filtermaterial beim anschließenden Einatmen, sitzt ihre Maske richtig. Bei einem Luftaustritt im Nasenbereich, drücken Sie den Nasenbügel stärker an. Wiederholen Sie die Dichtsitzkontrolle.

### Gebrauchsanweisung Modell GM-03:

Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit und das Verfallsdatum der Maske. Vor der Entnahme der Maske aus der Verpackung sowie vor dem Aufsetzen Hände gründlich reinigen.



1. Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung und falten Sie diese auf, indem Sie das Ober- und Unterteil der Maske auseinanderziehen und eine Schale formen. Achten Sie darauf, dass beide Teile vollständig entfaltet sind.



2. Legen Sie die Maske mit der offenen Seite nach oben in die Hand. Setzen Sie die Maske unter dem Kinn an, mit dem Nasenbügel nach oben und befestigen Sie die Ohrenbänder hinter den Ohren. Achten Sie darauf, dass die Ohrenbänder nicht verdreht sind.



3. Passen Sie das Ober- und Unterteil der Maske mit beiden Händen durch leichten Druck an Ihre Gesichtsförmung an, bis die Maske bequem sitzt und abdichtet. Achten Sie dabei auf die Passform am Nasenrücken und vergewissern Sie sich, dass die Ränder des Ober- und Unterteils nicht nach innen gefaltet sind.



4. Prüfen Sie die Dichtigkeit, indem Sie die Maske mit beiden Händen vorsichtig bedecken und dabei kräftig ausatmen. Dabei sollte an den Rändern keine Luft entweichen. Bewegt sich das Filtermaterial beim anschließenden Einatmen, sitzt ihre Maske richtig. Bei einem Luftaustritt im Nasenbereich, drücken Sie den Nasenbügel stärker an. Wiederholen Sie die Dichtsitzkontrolle.